


Delta-Form L3

INCONTINENCE

DELTA-FORM



100 - 150 cm

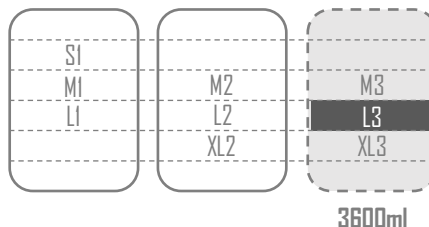

3600ml

UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE SÉVÈRE



Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.



Canaux absorbants

Le coussin est formé de canaux absorbants qui aspire le liquide et le diffuse sur l'ensemble de la surface du change.



Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.

Indicateur d'humidité

Le marquage sur l'enveloppe externe s'estompe progressivement au contact de l'urine.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Ailes	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile (100% polyéthylène), panneaux latéraux aérés
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates
Attaches	Polypropylène, adhésifs et crochets repositionnables
Marquages	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.

Delta-Form L3

DIMENSIONS PRODUIT

Dimensions totales: 98 x 80 cm

Dimensions coussin absorbant: 76 x 34-30 cm

ABSORPTION

Poids produit (+/-5%) : 160 g

Test Rothwell ISO 11948-1 (+/- 10%)	3600 ml
--	---------



DONNÉES LOGISTIQUES



Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
4	15	60	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Origine	
24	2,22 m	France	
EAN Sachet		EAN Carton	
5703538448294		5703538448300	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
59 x 39 x 35 cm	10,5 kg	9,7 kg	33x19x29 cm

GUIDE D'UTILISATION

POSITION COUCHÉE

- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Placer le résident sur son côté. A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes. B - Ajuster la face arrière du change.
- Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flans arrière sur la partie avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
- A - Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. B - Ajuster les bords autour de l'aîne.

POSITION DEBOUT

- Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.
- Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aîne.

